

# Návod k použití SYMFONY BPT30D



## Popis zařízení



## Tříbarevný displej



Zelený pro normální tlak



Oranžová pro mírně zvýšený tlak nebo hypotenzi



Červená pro vysoký tlak

Systolický Tlak (mmHg)	Diastolický Tlak (mmHg)	Barva displeje	Hierarchický vztah
≥160	≥100	červená	a (nebo)
140-159	90-99	oranžová	a (nebo)
90-139	60-89	zelená	a (nebo)
< 90	< 60	oranžová	a

**!** poznámka: Pokud zjistíte neočekávané hodnoty, poraďte se se svým lékařem.

## Jak nastavit uživatelské skupiny?


V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko " " pro vstup do rozhraní pro výběr skupiny uživatelů, poté znovu stiskněte tlačítko " " pro přepnutí a výběr skupin uživatelů



## Jak nastavit "rok/měsíc/den/čas"?


V pohotovostním režimu stiskněte " " po dobu 3 sekund pro vstup do rozhraní nastavení.

- Když bliká „rok“, stiskněte tlačítko „MEM“ pro nastavení požadovaného roku. Stiskněte tlačítko " " pro potvrzení a poté bude blikat "měsíc".
- Stejným způsobem upravte „měsíc“, „datum“, „čas“.

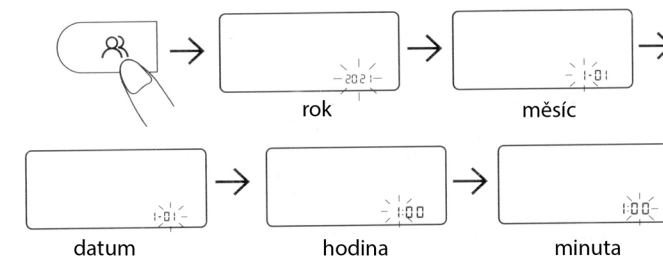


## Nastavení jednotek

Výchozí hodnota je mmHg. 1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "ON/OFF" po dobu asi 10 sekund, abyste vstoupili do výběru jednotky. 2. Stiskněte "MEM" pro přepínání mmHg/kPa. Stiskněte "MEM" pro potvrzení výběru.

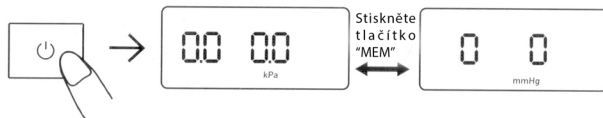

## Jak zkontrolovat data v paměti?

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "MEM" a přístroj zobrazí průměrnou hodnotu měření poprvé třikrát.
2. Stiskněte znovu tlačítko "MEM" pro kontrolu 99 sad hodnot paměti jednu po druhé.

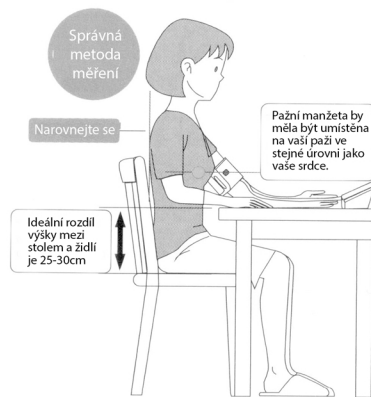

## 1) Správné sezení


Chcete-li provést měření, musíte se uvolnit a pohodlně se usadit v místnosti s příjemnou teplotou. Položte ruku na stůl.

- Posadte se do pohodlného křesla s podepřenými zády a paží.
- Udržujte chodidla naplocho a nohy nezkřížené.
- Pažní manžeta by měla být umístěna na vaší paži ve stejné úrovni jako vaše srdce, s paží pohodlně položenou na stole.

## 2) Přiložení pažní manžety


Odstraňte oděv na paži.

1. Připojte manžetu k monitoru tak, že vzduchovou zástrčku bezpečně zasunete do vzduchového konektoru.
2. Protáhněte ruku poutkem manžety. Zatahněte za manžetu, dokud nedosáhne vaší levé horní paže.

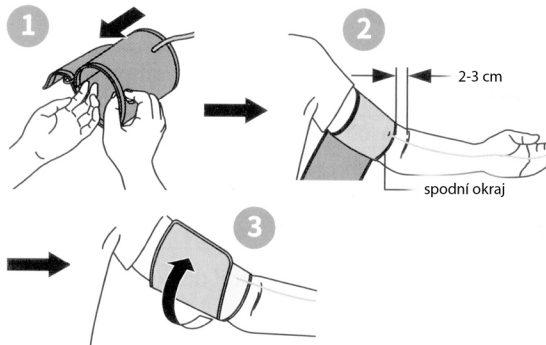

## 3) Měření

Začněte měřit po nasazení manžety: stiskněte tlačítko NO/OFF a monitor se začne nafukovat. Během měření se prosím nehýbejte ani nemlouve.

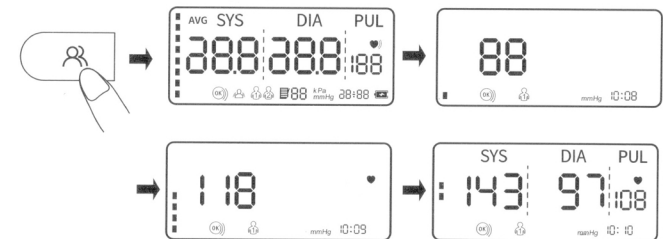

Distributor pro ČR  
Servatech s.r.o.  
Záběhlická 134/95,  
Praha 10, 106 00, Česká  
republika Tel: 277 279 330  
Email: info@servatech.cz